



Instrumental Cirúrgico para Ancora

Instrução de Uso

Descrição: Instrumental Cirúrgico para Ancora

Escopo: Estas instruções de uso são aplicáveis ao uso e manuseio do Instrumental Cirúrgico para Ancora Larsson ,antes da utilização inicial e após cada uso subsequente .Os Instrumentais são fornecidos mecanicamente limpos e não estéreis.

Indicação para Uso:

- Após cada utilização o profissional deverá realizar a limpeza e os procedimentos necessários para manter o instrumental em local adequado a fim de garantir sua integridade.
- O Instrumental deve ser manipulado cuidadosamente, em pequenos lotes, evitando-se batidas ou quedas. Qualquer instrumental que tenha caído, ou sido inadequadamente manuseado, ou suspeito de ter sofrido dano, deve ser separado e encaminhado ao responsável técnico habilitado da instituição para inspeção técnica.
- Todo instrumental, materiais novos e reparados ou materiais circulante, antes de disponibilizado para uso, deve ser submetido a inspeção técnica, objetivando a verificação de sua integridade
- O uso incorreto e por pessoas não capacitadas pode causar danos
- A escolha dos instrumentais adequados para cada procedimento é de competência do cirurgião
- É importante observar as precauções e advertências para limpeza e esterilização dos instrumentais.

Aplicação: O Instrumental Cirúrgico para Ancora –LARSSON é indicado para os casos de aplicações em cirurgias ortopédicas, tendo a finalidade de auxiliar o médico cirurgião nos procedimentos cirúrgicos específicos, sobretudo, na colocação de implantes ligamentares tipo Ancora. O Instrumental Cirúrgico para Ancora – LARSSON trata-se de instrumentais Cirurgicos especialmente projetados para auxiliar o cirurgião em procedimentos cirúrgicos proporcionando uma estabilização e fixação estável, trata-se de instrumentais reutilizáveis e reesterilizáveis