



INSTRUÇÃO DE USO

NOME TÉCNICO: BROCAS ODONTOLÓGICAS

NOME COMERCIAL: BROCAS DE CARBIDE- LARSSON

PRODUTO DE USO MÉDICO

PRODUTO ESTÉRIL

ATENÇÃO: Ler atentamente todas as instruções antes da utilização. Cumprir todas as advertências e precauções mencionadas nesta instrução. A não observação das orientações pode acarretar em danos ao equipamento ou complicações durante o procedimento.

1. Identificação do Produto

As Brocas de Carbide - Larsson são embaladas individualmente em embalagem de polietileno (Blister), e esterilizadas a Óxido de Etileno (ETO), sendo posteriormente acondicionadas em caixa de papelão com todas as informações necessárias ao produto

2. Materiais Utilizados na Fabricação das BROCAS DE CARBIDE - LARSSON

No caso de informações sigilosas, que não possam ser disponibilizadas no Portal da ANVISA, este campo deverá ser preenchido de modo resumido, e a descrição detalhada da composição deverá ser informada em anexo. As Brocas de Carbide - Larsson é fabricada com Haste em Aço Inoxidável AISI 465 e Ponta em Tungstênio.

3. Indicações

As Brocas de Carbide - Larsson é instrumento rotatório usados por profissionais da área odontológica no corte de tecido ósseo, no preparo cavitário, desgaste dental e de materiais restaurador-protéticos instaladas em micromotor de alta rotação, acionado através de motor elétrico.

Recomendamos o uso somente de instrumental original Larsson.



4. Modo de uso

As Brocas de Carbide – Larsson é instrumento rotatório usados por profissionais da área odontológica na remoção de tecido cariado, no preparo cavitário, desgaste dental e de materiais restaurador-protéticos instaladas em micromotor. Garanta que a broca esteja totalmente encaixada e presa na caneta de alta rotação. Certifique-se de que a caneta de alta rotação esteja em boas condições de funcionamento e permaneça corretamente lubrificada em todos os momentos. Mova continuamente a broca, quando em uso, de modo a evitar o aquecimento localizado causado pelo atrito. Nunca exceda a velocidade máxima, pois isto pode gerar calor indesejável. Não aplique pressão excessiva sobre a broca, pois pode provocar calor indesejável e/ou pode causar uma fratura da mesma.

OBSERVAÇÃO: O cirurgião deve ser um médico especializado que tenha recebido treinamento suficiente em técnicas de cirurgias ortopédicas. Este manual, portanto, não explica ou discute procedimentos clínicos ortopédicos. Este somente descreve a operação básica e precauções relacionadas à inserção do dispositivo médico

5. Condições de Manipulação do Produto

A manipulação deverá ser feita apenas por profissionais especializados da área médica odontológica. Somente cirurgiões dentistas devem fazer o uso deste produto, pois possuem informações científicas necessárias para o seu devido uso.

6. Condições de Armazenamento

As Brocas de Carbide – Larsson, devem ser mantidas em sua embalagem até o momento do uso com os devidos cuidados da área médico-hospitalar. O produto deve ser armazenado em local limpo e seco, a uma temperatura não superior a 50°C, longe de fontes de calor e evitando a exposição direta e prolongada a luz solar.

Atenção: cuidados na inspeção, recebimento, estocagem, transporte, limpeza, manipulação da embalagem e conservação do produto. Esses procedimentos sempre devem ser adotados em conjunto com as boas práticas de armazenamento e distribuição de produtos médicos.

7. Condições de transporter e manuseio



O transportador deve ser informado sobre o conteúdo. Os cuidados a serem tomados no transporte estão demonstrados na embalagem, assegurando assim, proteção do produto desde a expedição até a entrega ao cliente. As embalagens não devem ser deixadas à ação de intempéries.

Atenção: Não utilizar o produto sem antes verificar as condições de limpeza e inviolabilidade do produto. Caso perceba que o material tenha sido inadequadamente manuseado, ou com suspeita de ter sofrido dano, ou tenha colocado em risco a integridade da embalagem, este deve ser separado e segregado.

Não depositar objetos pesados sobre a embalagem.

8. Advertência

- Produto Exclusivo para Uso Odontológico.
- Uso Único – Descartar após o uso
- Proibido Reprocessar.
- Produto Estéril. Esterilizado a Óxido de Etileno atentar para o fato de a esterilidade ser assegurada somente enquanto a embalagem não for aberta, danificada ou molhada.
- Verifique se a haste se encontra devidamente encaixada no micromotor de alta rotação e que a refrigeração esteja funcionando adequadamente.

9. Precauções

- Antes de usar inspecione broca a fim de encontrar lâminas quebrados e/ou danificadas. Descartar qualquer broca potencialmente defeituosa.
- Não troque as Brocas com o motor em funcionamento;
- Antes do uso clínico, o cirurgião deverá compreender completamente todos os aspectos do método cirúrgico e as limitações do dispositivo;
- Não recomendamos a utilização deste dispositivo para outros fins diferentes dos indicados nesta instrução.
- Durante a operação o profissional deve utilizar todos os equipamentos de proteção individual, inclusive óculos de proteção.



PRODUTO DE USO ÚNICO – PROIBIDO REUTILIZAR

PRODUTO ESTÉRIL – PROIBIDO REPROCESSAR

**CONDIÇÕES ESPECIAIS DE ARMAZENAMENTO, CONSERVAÇÃO,
MANIPULAÇÃO DO PRODUTO MÉDICO:**

Fabricado por: LARSSON PRODUTOS MÉDICO LTDA

Endereço: Av. Tietê - Nova Gerty nº945

Cidade: São Caetano do Sul - SP - **CEP** 09572-401

CNPJ: 37.713.125/0001-79

Atendimento ao Consumidor - Fone: +55(11) 4233-2667

Email: sac@larsson.com.br