



**ATENÇÃO:** Ler atentamente todas as instruções antes da utilização. Cumprir todas as advertências e precauções mencionadas nesta instrução. A não observação das orientações pode acarretar em danos ao produto ou complicações durante o procedimento.

## **INSTRUÇÃO DE USO**

**NOME TÉCNICO:** BROCAS ODONTOLÓGICAS

**NOME COMERCIAL:** BROCAS-LARSSON

**PRODUTO DE USO MÉDICO**

**PRODUTO ESTÉRIL**

### **1. Identificação do Produto**

As Brocas - Larsson são embaladas individualmente em embalagem de polietileno (Blister), e esterilizadas a Óxido de Etileno (ETO), sendo posteriormente acondicionadas em caixa de papelão com todas as informações necessárias ao produto.

### **2. Materiais Utilizados na Fabricação das BROCAS CIRÚRGICAS-LARSSON**

No caso de informações sigilosas, que não possam ser disponibilizadas no Portal da ANVISA, este campo deverá ser preenchido de modo resumido, e a descrição detalhada composição deverá ser informada em anexo. As Brocas - Larsson é fabricada em Aço Inoxidável AISI 465.

### **3. Indicações**

As Brocas - Larsson é instrumento rotatório usados por profissionais da área odontológica onde é preciso perfurar, descascar, polir ossos e outros tecidos. Instaladas em micro motor de alta rotação, acionado através de motor elétrico.

**Recomendamos o uso somente de instrumental original Larsson.**



#### **4. Mododeuso**

Abrir a embalagem puxando pela aba de abertura na extremidade da embalagem, retira-la da embalagem. Seu manuseio deve seguir técnicas assépticas utilizadas nos centros cirúrgicos.

Conectar a broca na peça de mão, certificando-se que a mesma está bem fixada, interligar a peça de mão ao motor cirúrgico, selecionar a potência do motor de acordo com a necessidade exigida pelo procedimento e executar a operação.

O cirurgião encarregado de executar o procedimento é responsável pela escolha dos parâmetros, pela seleção dos instrumentos e a técnica cirúrgica necessária para a execução do ato cirúrgico.

#### **5. CondiçõesdeManipulaçãodoProduto**

A manipulação deverá ser feita apenas por profissionais especializados da área médica odontológica. Somente cirurgiões dentistas devem fazer o uso deste produto, pois possuem informações científicas necessárias para o seu devido uso.

#### **6. CondiçõesdeArmazenamento**

As Brocas – Larsson, devem ser mantidas em sua embalagem até o momento do uso com os devidos cuidados da área médico-hospitalar. O produto deve ser armazenado em local limpo e seco, a uma temperatura não superior a 50°C, longe de fontes de calor e evitando a exposição direta e prolongada à luz solar.

**Atenção:** cuidados na inspeção, recebimento, estocagem, transporte, limpeza, manipulação da embalagem e conservação do produto. Esses procedimentos sempre devem ser adotados em conjunto com as boas práticas de armazenamento e distribuição de produtos médicos.

#### **7. Condiçõesdetransporteremanuseio**

O transportador deve ser informado sobre o conteúdo. Os cuidados a serem tomados no transporte estão demonstrados na embalagem, assegurando assim, proteção do produto desde a expedição até a entrega ao cliente. As embalagens não devem ser deixadas à ação de intempéries.

**Atenção:** Não utilizar o produto sem antes verificar as condições de limpeza e inviolabilidade do produto. Caso perceba que o material tenha sido inadequadamente manuseado, ou com suspeita de ter sofrido dano, ou tenha colocado em risco a integridade da embalagem, este deve ser separado e segregado.



**Nãodepositarobjetospesadosobreembalagem.**

**8. Advertência**

- ProdutoExclusivoparaUsoOdontológico.
- UsoÚnico
- Descartarapósuso
- ProibidoReprocessar.
- Produto Estéril. Esterilizado a Óxido de Etileno atentar para o fato de aesterilidade ser assegurada somente enquanto a embalagem não foraberta, danificadaoumolhada.
- Verifique se a haste se encontra devidamente encaixada no micro motordealta rotaçãoe quearefrigeração estejafuncionandoadequadamente.

**9. Precauções**

- Antesdeusarinspecionebrocaafimdeencontrarlâminasquebradose/oudanificadas. Descartarqualquerbrocapotencialmentedefeituosa.
- Não troqueas Brocascomomotoremfuncionamento;
- Antesdousoclínico,ocirurgiãoodeverácompreendercompletamentetodososaspectos dométodocirúrgico easlimitaçõesdo dispositivo;
- Não recomendamos autilizaçãodestedispositivo paraoutrosfinsdiferentesdos indicados nestainstrução.
- Duranteaoperaçãooprofissionaldeveutilizartodososequipamentosde proteçãoindividual, inclusiveóculosdeproteção.

**PRODUTO DE USO ÚNICO –  
PROIBIDOREUTILIZAR**

**PRODUTO ESTÉRIL – PROIBIDO REPROCESSAR**

**CONDIÇÕES ESPECIAIS DE ARMAZENAMENTO, CONSERVAÇÃO,  
MANIPULAÇÃO DO PRODUTO MÉDICO:**

**Fabricadopor: LARSSON PRODUTOS MÉDICOS LTDA**

**Endereço: Av. Tietê -Nova Gertyn°945**

**Cidade: São Caetano do Sul-SP -CEP 09572-401**

**CNPJ: 37.713.125/0001-79**

**Atendimento ao Consumidor-Fone: +55(11)4233-2667**

**Email: falecom@larsson.com.br**