



Nome Comercial: KIT DESCARTÁVEL PARA ADENOAMIGDALA

Nome Técnico: KIT INSTRUMENTAL

Registro ANVISA: 82089409032

Responsável Técnico: Anderson Gomes Costa

CREA/SP: 5063054271

ATENÇÃO: Ler atentamente todas as instruções antes da utilização. Cumprir todas as advertências e precauções mencionadas nesta instrução. A não observância poderá levar à ocorrência de complicações.

**INSTRUÇÃO DE USO
PRODUTO DE USO ÚNICO - PROIBIDO REUTILIZAR
PRODUTO ESTÉRIL – USO UNICO
CONDIÇÕES ESPECIAIS DE ARMAZENAMENTO, CONSERVAÇÃO MANIPULAÇÃO
DO PRODUTO MÉDICO.**

**Aplicação, condições especiais de armazenamento, conservação, manipulação, reutilização,
precauções e advertências.**

Não utilizar o produto se a embalagem estiver danificada ou violada ou se o produto tiver vencido. Armazene e transporte o produto em local limpo e seco, longe de calor e ao abrigo da luz direta, sob Temperatura: +10° à +40°C – Umidade Relativa: 85% máxima.

1. Introdução

O KIT DESCARTÁVEL PARA ADENOAMIGDALA possui diferenciais que fazem dele o produto apropriado para uma cirurgia mais rápida e segura.

O KIT DESCARTÁVEL PARA ADENOAMIGDALA é composto pelos itens descritos no item 4 desta instrução de uso.

O KIT DESCARTÁVEL PARA ADENOAMIGDALA é fornecido estéril por ETO (Óxido de Etileno), embalado em blister duplo e selados a quente, comercializado individualmente e devidamente rotulado.

O KIT DESCARTÁVEL PARA ADENOAMIGDALA, é um produto recomendado para uso único, e têm seu reprocessamento proibido (Conforme RE 2605/2006).

2. Aplicação

O KIT DESCARTÁVEL PARA ADENOAMIGDALA é indicado para ser utilizado em procedimentos cirúrgicos de remoção das amígdalas e da edonoide, ocasionadas pela obstrução de vias aéreas superiores devido a hipertrofias estruturadas.

3. Materiais.

O KIT DESCARTÁVEL PARA ADENOAMIGDALA, possui componentes fabricados em aço inoxidável AISI 304, 430 conforme NBR 13911; aço inoxidável 4419 e Polipropileno(PP).

4. Especificações e Características Técnicas

O KIT DESCARTÁVEL PARA ADENOAMIGDALA, é composto por 05(cinco) itens, todos os materiais de uso em saúde.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ITEM	COMPONENTES DO KIT	CÓDIGO	QTDE.
1331.01	KIT DESCARTÁVEL PARA ADNOAMIGDALA	1	Lâmina Aspiradora Angular	1330.01	1
		2	Cureta de Adenoide	1330.02	1
		3	Cânula de Sucção	1330.03	1
		4	Afastador	1330.04	1
		5	Descolador	1330.05	1

5. Princípio de Funcionamento

O KIT DESCARTÁVEL PARA ADENOAMIGDALA é formado pelos componentes citados acima, e tem como função a remoção das amígdalas e adenoídes, sem a necessidade de incisões de grande extensão. Os instrumentos tem como função tornar o procedimento menos invasivo e seguro, sempre levando em conta a técnica utilizada pelo cirurgião, na qual ocasionara na remoção das amígdalas e curetagem do tecido adenoideano.

6. Instruções para Uso do Produto.

Abrir a embalagem puxando pela aba de abertura em sua extremidade, retirar o kit da embalagem. Seu manuseio deve seguir técnicas assépticas já utilizadas nos centros cirúrgicos. Inicialmente são definidos os pontos de inserção para o descolamento das amígdalas, com auxílio da cureta adenoide aplica a técnica de dissecação mecânica do tecido amigdaliano e adenoideano, por sua vez a cânula de sucção aspira e mantém o local limpo. O cirurgião encarregado de executar o procedimento é responsável pela escolha dos parâmetros, pela seleção dos instrumentos e a técnica cirúrgica necessária para boa execução do ato cirúrgico. Na qualidade de fabricante, a LARSSON PRODUTOS MEDICOS LTDA não recomenda uma técnica cirúrgica específica. Os instrumentos que compõe o KIT DESCARTÁVEL PARA ADENOAMIGDALA têm as seguintes funções:

- **1330.01 – Lâmina Aspirador Angular;** Realizar a incisão para início do processo de descolamento das amígdalas.
- **1330.02 – Cureta Adenoide;** Auxiliar na técnica de dissecação mecânica do tecido amigdaliano e curetagem do tecido adenoideano.

- **1330.03 - Cânula de Sucção;** Auxiliar através da aspiração mantendo limpo e visível o local da cirurgia durante execução do processo de Adenoamigdalectomia.
- **1330.04 – Afastador;** Auxiliar no descolamento da amígdala após realizada a incisão, fazendo a separação da mesma de forma correta sem causar lesões.
- **1330.05 – Descolador;** Auxiliar no descolamento da amígdala após realizada a incisão, fazendo a separação da mesma de forma correta sem causar lesões.

7. Condições de Manipulação

O KIT DESCARTÁVEL PARA ADENOAMIGDALA deve ser manipulado cuidadosamente e individualmente, evitando-se batidas ou quedas. Qualquer produto que tenha caído ou sido inadequadamente manuseado, ou com suspeita de ter sofrido dano, conforme procedimentos específicos deve ser separado e segregado.

8. Condições de Armazenamento, Transporte e Manipulação

O KIT DESCARTÁVEL PARA ADENOAMIGDALA deve ser armazenado em local limpo, seco, arejado, a temperatura ambiente e ao abrigo da luz. As condições especiais de armazenamento, manipulação e conservação do produto devem ser seguidas no intuito de assegurar que os componentes permaneçam intactos para o procedimento cirúrgico. Cuidados com o recebimento, estocagem, transporte, limpeza e conservação das referências do lote devem ser adotados em conjunto com as boas práticas de armazenamento e distribuição de produtos médicos.

O KIT DESCARTÁVEL PARA ADENOAMIGDALA deve ser transportado e manuseado de forma a impedir qualquer dano ou alteração nas suas características.

9. Verificação da Embalagem

O produto é fornecido embalado na forma estéril. Antes da abertura da embalagem os seguintes aspectos devem ser verificados:

- **Integridade da Embalagem:** Caso a embalagem esteja violada ou danificada, o produto não pode ser utilizado;
- **Prazo de Validade:** Não utilizar o produto se o prazo de validade estiver vencido.

Após abertura da embalagem os seguintes aspectos devem ser verificados:

- **Integridade do produto:** O produto deve estar íntegro, com a superfície uniforme, livre de riscos e manchas ou qualquer sinal de dano. Utilizar somente produtos que estejam nessas condições;

- Nunca utilizar os produtos danificados;
- O conteúdo de embalagens abertas que não foram utilizadas deve ser descartado, não reesterilizar. Não são aceitas devoluções se a caixa estiver aberta.

10. Composições da Embalagem

Estes produtos são comercializados em embalagem primária estéreis seladas, composta por duas faces, uma poliéster / polipropileno (blister) e a outra por fibra de celulose (papel cirúrgico). Essa embalagem primária é acondicionada na embalagem secundária de paleão em formato de caixa, onde é afixada a etiqueta de identificação contendo informações de acordo com os critérios estabelecidos pela resolução RDC nº 185/2001, e envolvida por uma embalagem terciária com filme plástico.

11. Identificação e Rastreabilidade

O produto contém itens de identificação e rastreabilidade marcados em sua estrutura através do rótulo de identificação e as etiquetas de rastreabilidade.

O KIT DESCARTÁVEL PARA ADENOAMIGDALA , é fornecido com 1 (um) rótulo em sua embalagem externa e mais 4 (quatro) etiquetas de rastreabilidade em sua embalagem interna.

É de responsabilidade do médico cirurgião/hospital registrar no prontuário do paciente dados descritivos constantes do rótulo.

12. Prazo de Validade

O KIT DESCARTÁVEL PARA ADENOAMIGDALA tem validade de 05 anos.

13. Descarte do Material

O descarte de peças desqualificadas deve ser feito sob avaliação e orientação técnica. Após a substituição, os componentes danificados devem ser destruídos, a fim de evitar-se, de forma indevida, o uso posterior. O descarte do instrumental deverá obedecer às normas relativas à eliminação de lixo hospitalar contaminante, descartando-se em recipientes apropriados e com identificação clara de que se trata de lixo contaminante. Recomendamos que as peças sejam cortadas, entortadas ou limadas para sua inutilização. Para descartar o instrumental seguir os procedimentos legais locais do país para descarte de produtos potencialmente contaminantes.

14. Advertências

- Não utilizar o produto antes de ler em sua totalidade as instruções de uso a seguir;
- A embalagem estéril deve ser inspecionada visualmente antes do uso para detecção de qualquer violação da mesma;
- Não utilizar o produto se a embalagem estiver aberta ou danificada;
- Produto de uso único, não reutilizar;
- Não utilizar o produto se houver sinais de danos à mesma;
- Tome cuidado ao manusear o produto. A borda cortante pode causar lesão ao operador, se não manuseada com cuidado;

O paciente deve ser informado quanto:

- Contra indicações, efeitos adversos e advertências relacionadas ao procedimento;
- O paciente deve ser informado quanto à importância do acompanhamento pós-cirúrgico. A falta de acompanhamento impede a detecção de problemas pós- cirúrgicos.

15. Esterilização

O KIT DESCARTÁVEL PARA ADENOAMIGDALA é submetido a esterilização por óxido de etileno (ETO).

16. Precauções

- Não utilizar o produto se a embalagem estiver aberta ou danificada;
- Produto de uso único, PROIBIDO REPROCESSAR;
- Produto a ser utilizado somente por profissional qualificado;
- Antes de iniciar o procedimento, devem ser identificadas as estruturas anatômicas do paciente a fim de garantir que o ponto de inserção dos componentes do KIT DESCARTÁVEL PARA ADENOAMIGDALA esteja longe de vasos sanguíneos e outras estruturas anatômicas de interesse;
- Não exercer força excessiva no manuseio do produto, pois a pressão excessiva pode provocar danos em estruturas anatômicas e tecidos próximo ao local de inserção dos instrumentais;
- O médico cirurgião deve estar familiarizado e deter conhecimentos suficientes da técnica cirúrgica e sua limitação, incluindo o pré e pós- operatório, técnica cirúrgica adotada, precauções e riscos potenciais.



17. Contra Indicações

Este produto não pode ser utilizado em procedimentos no sistema nervoso central ou sistema circulatório central.

18. Reclamações e Notificações

Todo cliente ou usuário desse dispositivo médico que tiver dúvidas ou queira maiores esclarecimentos sobre os serviços e/ou produtos oferecidos, poderá entrar em contato com a LARSSON PRODUTOS MEDICOS LTDA. Para o envio de dispositivos médicos explanados ao fabricante para análise, o produto deve estar limpo e estéril. Devem ser utilizadas embalagens que mantenham a integridade física do produto médico. O seguinte endereço deve ser utilizado:

Fabricante: LARSSON PRODUTOS MEDICOS LTDA

Endereço: Av. Tietê, Nova Gerty nº945, São Caetano do sul – SP CEP:09572-401

CNPJ: 37.713.125/0001-79

Atendimento Consumidor: Fone (11) 4233-2667

E-mail: falecom@larsson.com.br